
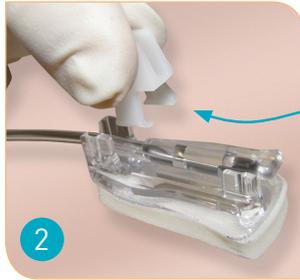


GRIPPER PLUS® - GRIPPER PLUS® Power P.A.C.

Guide d'utilisation

INSERTION - ACCÈS À LA CHAMBRE

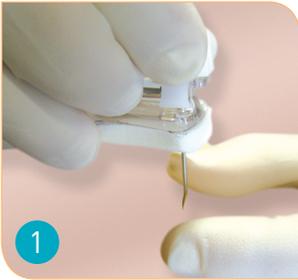

- 1
 - Préparer le site de ponction selon le protocole de soins en vigueur.
 - Maintenir le GRIPPER PLUS® à l'aide de la pince de préhension et piquer à 90° dans la chambre.
- 2
 - Pincer les ailettes et retirer la pince en la faisant glisser en arrière.
 - Procéder au pansement selon le protocole en vigueur.

RETRAIT EN PRESSION POSITIVE

Technique à une main



- 3
 - A l'aide du pouce et du majeur, maintenir la plateforme contre la chambre implantable.
 - Tenir la seringue de l'autre main.
 - Procéder au rinçage pulsé.*
- 4
 - Relever l'aiguille avec l'index jusqu'au clic sonore tout en maintenant une pression positive.*

Technique à deux mains



- 3
 - Positionner les doigts de chaque côté de la plateforme.
 - De l'autre main, tenir la seringue et placer l'index sur le levier de l'aiguille de sécurité.
 - Procéder au rinçage pulsé.*
- 4
 - Relever l'aiguille avec l'index jusqu'au clic sonore tout en maintenant une pression positive.*

Élimination du GRIPPER PLUS®



- 5
 - L'aiguille de sécurité GRIPPER PLUS® peut alors être éliminée dans un collecteur adapté.

C'est aussi simple que cela !

* Selon les recommandations SF2H 2012

Se référer aux instructions de la notice d'utilisation pour une description détaillée du produit et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d'emploi.

LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

Smiths Medical ASD, Inc.
St. Paul, MN 55112, USA
Phone: 1-214-618-0218
Toll-Free USA: 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com

Smiths Medical France
3, rue du Pont des Halles
94656 RUNGIS Cedex
Tel: 01 58 42 50 00

EC Authorized Representative
Smiths Medical International Ltd.
TN25 4BF, UK
Tél : +44 (0) 1233 722100

MPAUC-1193



Documentation destinée aux professionnels de santé.

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Gripper Plus et les logos Smiths Medical et Deltec sont des marques commerciales de Smiths Medical. Le symbole ® signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. ©2014 Smiths Medical. Tous droits réservés. VA192536FR-102014

Deltec®